

操作说明指南

下载并安装电子秤的应用

安卓设备，前往腾讯应用宝下载电子秤的应用。 注意：安卓设备的操作系统为 4.3 以上。


打开安卓设备的蓝牙

前往“设置”>“蓝牙”，打开蓝牙




开启电子秤

给电子秤直接上电，就可以开启电子秤。

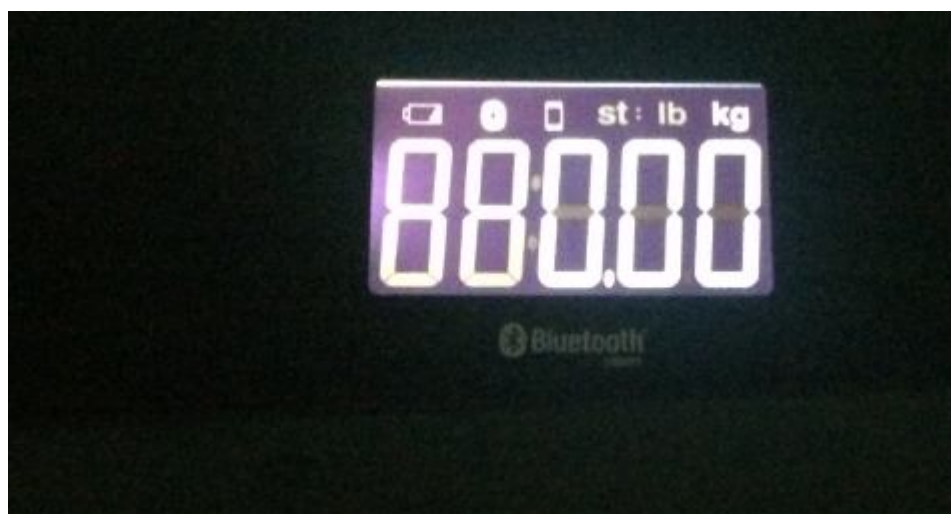


APP 连接操作


点击人体秤的 APP, 进入搜索界面, 在界面的最上角就会出现搜索到的设备, 然后点击你所要用的设备就会进入到设备界面, 会在最上角的位置显示已连接, 人体秤的显示屏上会显示出蓝牙的标示。如果是断开的, 手机 APP 界面就会显示断开, 并且人体秤的显示屏上不会显示出蓝牙的标示。注: 厨房秤和人体秤是同一个 APP, 当你连接厨房秤的时候出现厨房秤的界面, 连接人体秤会出现人体秤的界面。





用户操作

(1) 点击用户操作，进入用户管理界面，点击可以创建用户。

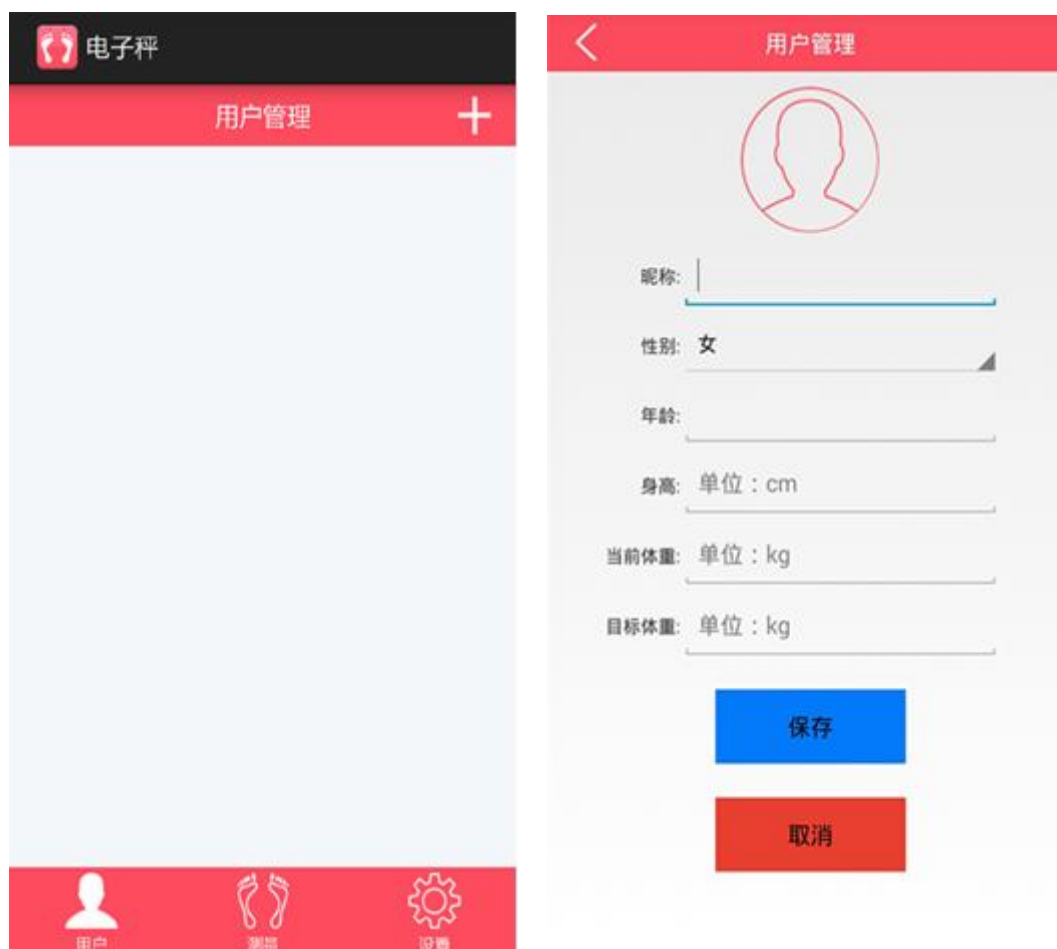注：设置用户的名称小于 6 位数，年龄是大于 0 岁小于 120 岁，身高大于 40cm 小于 230cm,体重大于 2.5 公斤小于 200 公斤。



(2) 用户切换、删除和修改。

点击用户进入用户管理界面，然后点击你所切换的用户向左移动，点击就可以切换到当前用户了。如果要删除这个用户点击就可以删除这个用户了。要修改用户信息直接点击您创建的用户，然后点击修改就可以修改信息了。

用户管理 

 qwr 

用户管理 

qwr   

< qwr



昵称:

性别:


年龄:

身高:

当前体重:

目标体重:

测量操作

手机 APP 与电子秤连接上的状态下打开手机 APP，当人站在人体秤上的时候，手机 APP 显示的数值会随着人体秤显示的数值的变化而变化。而且指针也会随之变化的。手机 APP 人体秤界面还可以看到体重多少千克、脂肪百分之多少、水分是多少千克、肌肉是多少千克、骨骼是多少千克。如果你把手机 APP 的测量界面点击到别的界面，要切换回测量的界面点击  就可以切换回原来的界面了。注：指针是根据 BMI 值做的。



清零操作

进入手机 APP 界面，然后把所称重的数值切换到其他界面会自动清零。


测量数据的保存


测量数据在有用户的情况下，才可以保存测量数据。保存在手机中的数据库里面。如果没有用户，手机 APP 界面会提示：测量数据保存失败，没有用户。保存的测量数据，是以折线图的形式保存的。点击体重，可以看到体重的测量数据。点击脂肪，可以看到脂肪的测量数据。点击水分，可以看到水分的测量数据。点击肌肉，可以看到肌肉的测量数据。点击骨骼可以看到骨骼的测量数据。





设置功能

点击  进入设置，可以设置单位、指针、模拟称重声音。如果你有什么问题可以联系我们，点击联系我们就可以看到你所要联系的信息和公司的网址。

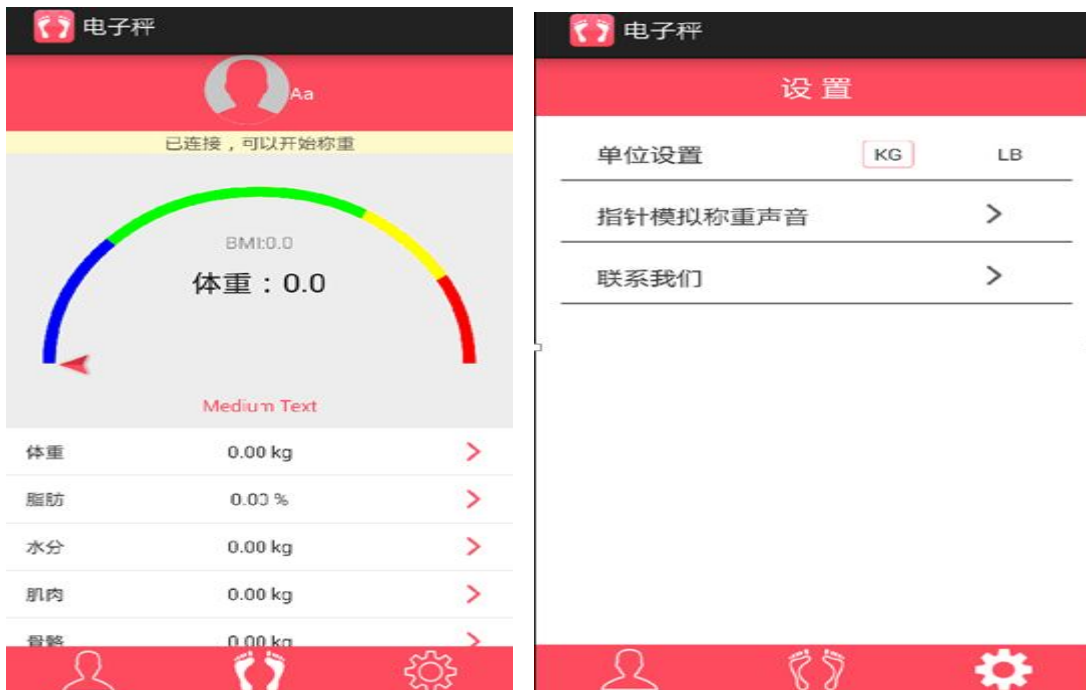

退出

如果要退出的话直接按手机中的返回键即可。